

Perfect Malen mit 20 Komponenten

priti perfect – die wirtschaftliche 1-Brand-Lösung



Perfect bemalte Brücke mit glänzenden Effekten.

Keep it simple – mit nur 19 Pasten und einem Liquid erzielen Zahntechniker ein lebendiges Oberflächen-Finish vor allem bei monolithischen Zirkoniumdioxid-Versorgungen. priti perfect heißt das neue Mal- und Strukturpastensystem des Zirkoniumdioxid-Spezialisten pritidenta. Mit nur 20 Komponenten zielt priti perfect auf die sehr effektive und ästhetische 1-Brand-Lösung. Gleichwohl kann je nach Fall auch die 2-Brand-Lösung oder Internal Staining gewählt werden. Denn bei der Entwicklung stand das effektive Gestalten im Fokus.

Die Versorgungen werden beispielsweise aus priti multidisc ZrO₂ Multicolor-Ronden gefräst, gesintert und mit priti perfect zu ästhetischen Unikaten finalisiert. Das Mal- und Strukturpastensystem steht für die Stabilität der Farbwirkung vom Modell bis zum Mund.

Die Kontrolle behalten: Für den Zahntechniker ist das mit der Pinseltechnik und den pastösen Massen besonders leicht! Bereits beim Auftragen erkennt er die endgültige Farbe – ein Plus, das Keramikspezialisten im Labor sehr schätzen.

1-Brand-Lösung

Keep it simple: Optimal für einen geringen Individualisierungsaufwand (z. B. Seitenzahn).

1. Glasur flächig auftragen
2. Schneide mit transpa-pigeon und / oder transpa-blue bemalen
3. Halosaum mit halo auftragen
4. Brennen
5. Fertig!

2-Brand-Lösung

Next Level: Für die maximale Individualität einer perfekten finalisierten Krone (z. B. beim Frontzahn) empfiehlt pritidenta die 2-Brand-Lösung. Zahntechniker haben hier die Möglichkeit, weitere Effekte in 3D-Optik zu erzeugen.

Freigegeben ist das Malsystem für Zirkoniumdioxid, monolithisches Zirkoniumdioxid, Zirkoniumdioxidschichtkeramik, Metallschichtkeramik und Lithiumdisilikat. Vorgestellt wird das System auch auf der IDS 2021 (Halle 10.2 | Stand R028).



Halle 10.2
Stand R028

QR-Codes scannen und YouTube-Videos zur 1-Brand-Lösung (l.) und 2-Brand-Lösung (r.) anschauen.



Kontakt:

pritidenta GmbH
Meisenweg 37
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. +49 (0)711 / 32 06 56-0
info@pritidenta.com
www.pritidenta.com